

PolyMem® WIC

PolyMem er en unik multifunksjonell bandasje som er designet for optimalt og aktivt stimulere sårtilhelings prosessen. Alle PoyMem bandasjene inneholder Glycerin, Surfactant og Superabsorbent som effektivt renser, fyller, absorberer og gir en jevn fuktighet til såret under hele sårtilhelings prosessen

PolyMem WIC

Bandasje for dype sår og kaviteter. Bandasjen er uten semipermeabel film og absorberer derfor fra begge sider. Kan brukes som sårkontaktlag. La bandasjen fylle bare 2/3 av kaviteten, da bandasjen kan ekspandere når den fyller seg. Dersom såret er tørt, fuktes det med vann eller natriumklorid. Brukes i kombinasjon med en sekundærbandasje som for eksempel PolyMem Max. Til fistelganger anbefales PolyMem Wic silver rope. Denne finnes bare med sølv.



POLYMEM WIC

Art.nr.	Størrelse	Ant. stk.	Ant. krt.
5731	2,5 x 7,6 cm	14 stk	5 stk
5733	8 x 8 cm	10 stk	4 stk
5712	8 x 30 cm	12 stk	1 stk
5788	20 x 20 cm	5 stk	2 stk

POLYMEM WIC MED SØLV

Art.nr.	Størrelse	Ant. stk.	Ant. krt.
1331	2,5 x 7,6 cm	14 stk	5 stk
1333	8 x 8 cm	10 stk	2 stk
1814	1 x 35 cm	6 stk	2 stk

EGENSKAPER POLYMEM

- Reduserer inflammasjon
- Reduserer smerte
- Optimaliserer fuktighetsbalansen i såret
- Fremmer sårtilhelingen
- Opprenskende effekt
- Stimulerer den autolytiske revisjon
- Økt kappilær kraft fremmer nydanning av granulasjonsvev
- Reduserer risiko for infeksjoner
- Mindre smerte ved bandasjeskift - bandasjen fester seg ikke i såret

NÅR BRUKES POLYMEM

- Trykksår
- Diabetessår
- Venøse og arterielle sår
- Donorflater og transplantat
- Dermatologiske lidelser
- Overfladiske sår
- Traumatiske sår
- Kirurgiske sår
- Brannskader 1. og 2. grad
- Stråleskader
- Blottede sener
- Rundt tracheostomier, sonder og kateter